



THUASNE®

CICATREX® kompression

Reducerar ärr vid
exempelvis brännskador
och kirurgiska ingrepp.






Vad är skillnaden mellan kompression som används vid venösa eller lymfrelaterade ödem och kompression vid ärr och brännskada?

Medicinska kompressionsstrumpor som används vid venös insufficiens och lymfödem har en markant avtagande kompression enligt en medicinsk standard. Det högsta trycket är applicerat vid ankeln eller vristen och avtar sedan för att kompressionsstrumpan inte ska riskera att stänga av cirkulationen.

Vid ärr eller brännskada strävar istället kompressionen efter att härma hudens naturliga mottryck så att återskapandet av hudceller sker lugnare och mer kontrollerat. Därför är kompressionen mer jämnt applicerad och har endast ett lättare avtagande tryck.

Eftersom ett markant avtagande tryck endast är viktigt för arm och ben kan Cicatrex användas för lymfödem vid exempelvis thorax och huvud.

Ärrbehandling

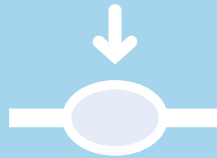

CICATREX® används vid alla former av ärrbehandling, exempelvis plastikoperation, kirurgi, brännskador, kemiska eller elektriska brännskador eller andra djupa hudskador.

Många människor råkar någon gång i livet ut för en djupare hudskada som resulterar i att ett ärr uppstår. Beroende på storlek, struktur och placering på kroppen kan de innebära funktionella eller estetiska begränsningar.

CICATREX® imiterar den friska hudens naturliga mottryck varvid produktionen av kollagen i ärrvävnaden sker på ett mer strukturerat sätt. På så vis förebyggs upphöjda ärr, keloider och ärrkontrakturer.

CICATREX® utmärker sig främst genom bredden av material och utföranden, som vart och ett har mycket specifika och optimala egenskaper för att främja läkningsprocessen – och för att passa varje patients unika situation.

Så fungerar Cicatrix



Hypertrofiskt ärr
före behandlingen

Kompressionens verkan
under behandlingen

Platta utläkta ärr
efter behandlingen

Med en kompression som imiterar hudens naturliga mottryck signalerar **CICATREX®** till vävnaden att normal hudnivå har uppnåtts. Genomblödningen i vävnaden normaliseras och kollagenfibrerna lägger sig parallellt med huden. **CICATREX®** förebygger även inflammation i vävnaden, lindrar klåda och ser till att det nya ärrret är ordentligt skyddat.


CICATREX SKIN




CICATREX® SKIN utmärker sig med sin fina, lena och täta stickning och är det tunnaste och mest elastiska materialet i sortimentet. Eftersom materialet är vävt kan det klippas i utan att repas upp.

- **Estetiskt attraktivt** och silkeslent utförande
- **Kan klippas i** utan att materialet repas upp
- **Enkel att ta på och av**
- **Många olika färger**


MÅTTILLVERKNING

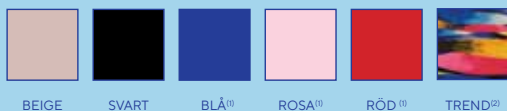

STANDARD

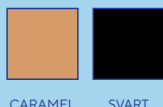


Standard: 59% polyamid, 41% Dorlastan®
MTM: 59% polyamid, 41% elastan

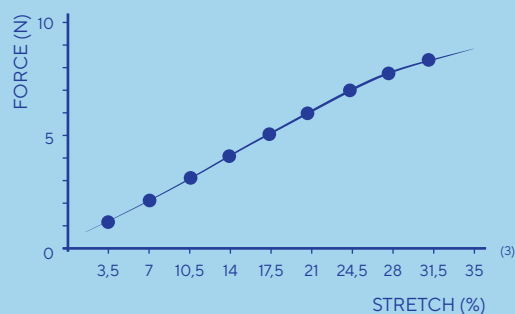

Cicatrex SKIN MTM

Cicatrex SKIN Standard

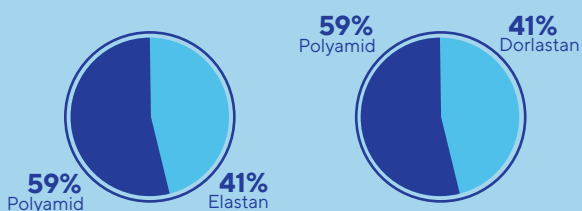

CICATREX NATURE



CICATREX® NATURE kompressionsmaterial innehåller en hög andel viskos. Den höga andelen naturlig råvara medför att materialet är mjukt och behagligt mot huden samtidigt som materialet andas väldigt effektivt. Det vävda materialet lämpar sig utmärkt vid den initiala behandlingsfasen.

- **Skonsamt material** tack vare den höga andelen viskos
- **Anpassningsbart material** med perfekt passform
- **Tillgängligt** som både **flatstickat** och **vävt material**
- **Tåligt material** idealisk för barn
- **Många olika färger**



MÅTTILLVERKNING



STANDARD



Stickat: 54% viskos, 27% polyester, 19% elastan
Vävt: 54% viskos, 37% polyester, 9% elastan

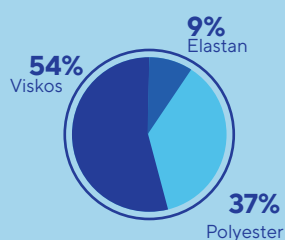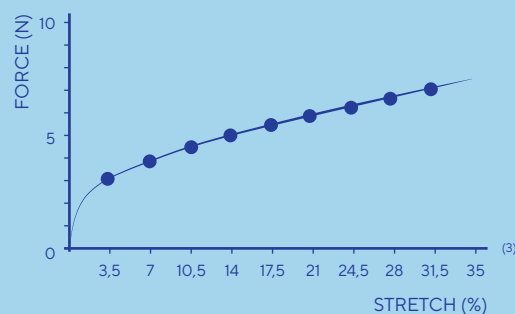


CICATREX RIGID





CICATREX® RIGID är ett robust och tåligt flatstickat material som är mycket slitstarkt. Det lämpar sig utmärkt för aktiva personer och lekande barn. Den glatta ytstrukturen från polyamidmikrotrådarna förhindrar fula noppor och bidrar till att materialet torkar väldigt snabbt efter tvätt.

- **Slitstarkt och tåligt material** som är perfekt för aktiva personer och barn
- **Flatstickat och tåligt material** som stickas med millimeterprecision för perfekt passform
- **Många olika färger**

MÅTTILLVERKNING

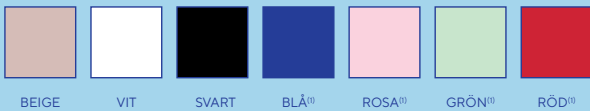

81% polyamid, 19% elastan

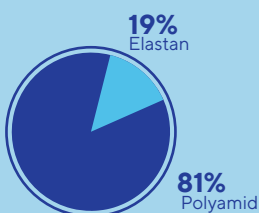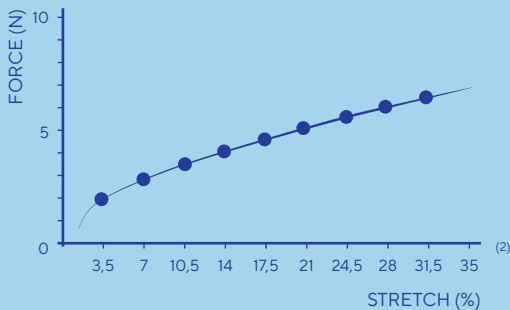


CICATREX SILVER





CICATREX® SILVER är ett flatstickat kompressionsmaterial med integrerade silvertrådar. Silver eliminerar effektivt bakterier och skyddar från infektioner. Det är speciellt viktigt för patienter med känslig hud eller infektionsproblem. Det lindrar klåda och verkar termodynamiskt

- **Integrerade silvertrådar** eliminerar bakterier och motverkar infektion
- **Effekten av silvertrådarna** försvinner inte vid tvätt och riskerar därför inte att skada naturen
- **Flatstickat och tåligt material** som stickas med millimeterprecision för perfekt passform
- **Många olika färger**

MÅTTILLVERKNING

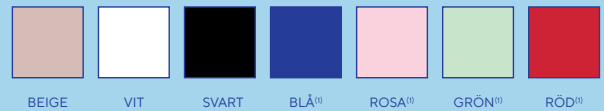

46% viskos, 27% polyester, 19% elastan, 8% silverbeklädd polyamid

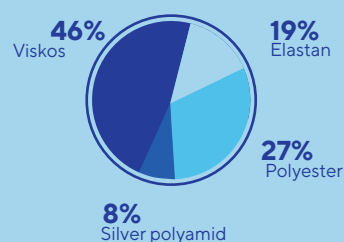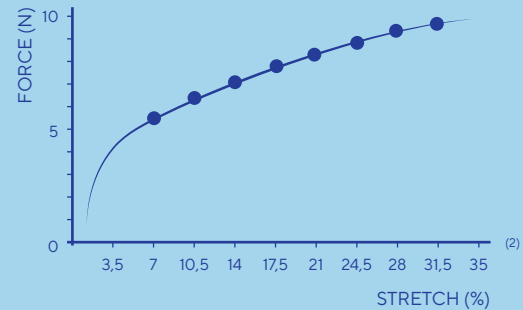



Vid vilka indikationer lämpar sig Cicatrex?

- Reducering av ärr efter alla former av kirurgiska ingrepp och brännskador, exempelvis el-, eld och kemrelaterade.
- Vid primära och sekundära lymfödem hos barn.
- Vid lymfödem i huvud, hals, överkropp, underkropp.
- Cicatrex Skin standardhandske: Lättare ödem i handen, exempelvis post op-ödem, gärna i kombination med en Mobiderm-pelott.
- Cicatrex Skin standardhandske: Interim-lösning vid lymfödem, exempelvis i väntan på måttbeställd flatstickad medicinsk kompressionshandske.

CICATREX® SKIN – STANDARD

CICATREX® SKIN är ett höglastiskt, hudvänligt och lent material. En stor fördel är att du kan klippa i materialet utan att det repar upp sig.

CICATREX® SKIN kan måttillverkas i olika utföranden för hela kroppen men är även tillgängligt som handske med öppna eller slutna fingrar, fingerstrumpa och armstrumpa i standardstorlekar.



Handske med slutna fingrar

Art nr 344806
Storlek 1 – 8
Färg Caramel & Svart



Handske med öppna fingrar

Art nr 344807
Storlek 1 – 8
Färg Caramel & Svart



Handske lång med slutna fingrar


Art nr 344805
Storlek 1 – 8
Färg Caramel & Svart



Fingerstrumpa

Art nr 344602 (50-pack)
Storlek 1 – 2
Färg Caramel

Måttabell handske

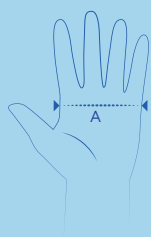

Stl	Handomfång (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

Måttabell fingerstrumpa




Stl	Handomfång (A)
1	25 - 27 mm
2	29 - 31 mm

Måttet tas runt fingerbasen



Armstrumpa

Art nr 344902
Storlek 1 – 6
Färg Caramel

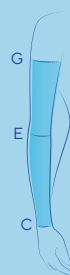

Måttabell armstrumpa

Stl	Omfång (G)	Omfång (E)	Omfång (C)
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm

CICATREX® NATURE – STANDARD


CICATREX® NATURE i standardstorlek är ett flatstickat material med en perfekt balans mellan elasticitet och hållbarhet. Materialet innehåller bland annat viskos vilket bidrar till ett mjukt material som andas effektivt.

CICATREX® NATURE kan även måttillverkas med millimeterprecision i utföranden för hela kroppen. Som måttillverkat finns materialet även i vävt utförande vilket innebär extra god passform och att du kan klippa i materialet utan att det repas upp.



Lång sleeve / tub för arm och ben 342501

Stl	Omfång (A)	Omfång (B)	Längd (AB)	Färg
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	 VIT
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm		
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm	45 cm	
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm		
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm		
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm		
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm		

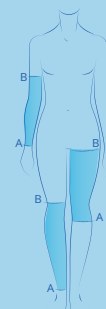

Kort sleeve / tub för arm och ben 340001

Stl	Omfång (A)	Längd	Färg
1	12 - 14 cm	20 cm	 VIT
2	15 - 17 cm		
3	18 - 22 cm	26 cm	
4	23 - 29 cm		
5	30 - 37 cm		
6	38 - 45 cm		
7	46 - 54 cm		
8	55 - 63 cm		



Omfångmättet tas där i mitten av den tänkta sleeveen



Tåkappa 340603

Stl	Omfång (A)	Färg
1	21 - 22 cm	 SVART
2	23 - 24 cm	
3	25 - 26 cm	
4	27 - 28 cm	




Omfångmättet (A) tas vid tåbasen

Gördel 340109


Stl	Omfång vid A eller B	Färg
1	70 - 92 cm	 VIT
2	93 - 114 cm	

Omfångmättet tas under bröstet eller vid höften

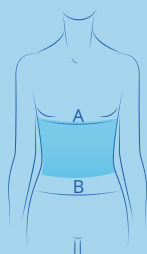


Väst utan ärmor 342401


Stl	Omfång bröstkorg (A)	Färg
1	74 - 82 cm	 VIT
2	83 - 91 cm	
3	92 - 98 cm	
4	99 - 115 cm	
5	116 - 120 cm	
6	121 - 135 cm	

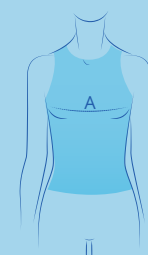



Trosa 341501 / Cykelbyxa 340301

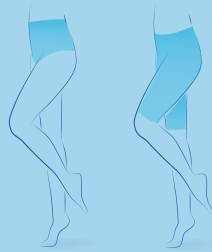



Stl	Färg
1	
2	
3	 VIT
4	
5	
6	



Capri 341201 / Leggings 342001




Stl	Färg
1	 VIT
2	
3	
4	 SVART
5	
6	

MÅTTABELL


Omfångsmåttet (A) tas ca 3 - 4 cm ovanför blygdbenet på framsidan och runt skinkornas ovasida på baksidan.

Omfångsmåttet (B) tas runt midjan.

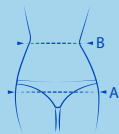


Stl	Omfång (A)	Midjeomfång (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm


Huva 340201

Stl	Huvudomfång (A)	Färg
0	51 - 52 cm	 VIT
1	53 - 55 cm	
2	56 - 57 cm	
3	58 - 59 cm	


Partiell huva 341001

Stl	Huvudomfång (B)	Färg
1	27 - 30 cm	 VIT
2	31 - 36 cm	
3	37 - 45 cm	

Öppen huva 341601

Stl	Huvudomfång (A)	Färg
0	51 - 52 cm	 VIT
1	53 - 55 cm	
2	56 - 57 cm	
3	58 - 59 cm	


Öronband 341109

Stl	Huvudomfång (A)	Färg
1	< 52 cm	 VIT
2	> 52 cm	

CICATREX® - MÅTTILLVERKADE UTFÖRANDEN

TORSO

Utföranden	Väst Body Skulderkappa
Krage	V-krage Rund krage Uppåttstående krage
Öppningar	Dragkedja Hakar i nederkant för enklare stängning Kompressionspelott Grenband
Övriga tillval	Kupa med eller utan kompression Armhåla med eller utan kompression Band Extra öppningar (dragkedja, kardborre) Kardborre för fastsättning på byxa

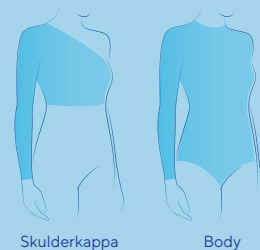

Skulderkappa


Body



Väst

HAND

Utföranden	Handdel (maxlängd 5 cm upp på armen) Handske (maxlängd 5 cm upp på armen) Fingerstrumpa
Avslut	Med armstrumpa (från 5 cm och upp till armhålan): • integrerad • separat
Öppningar	Dragkedja / kardborre: • handflata • handrygg • på lillfingersidan
Fingerstrumpa	Med eller utan handledsfäste
Övriga tillval	Kompressionspelott: • handflata • handrygg • fixerad • avtagbar

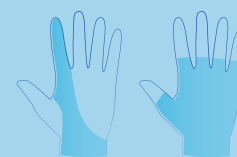

Finger protector

Mitten



Glove

ARM

Utföranden	Armstrumpa Utan häftband Triksåvslut Häftband med noppor 3 cm Silikonhäftband för män 5 cm Silikonhäftband för kvinnor 5 cm Häftband Latex 3 cm Skulderkappa BH-fäste
Fastsättning	
Öppningar	Dragkedja / kardborre • På sidan • Ovansida • Undersida
Övriga tillval	Kompressionspelott



Armsleeve

HUVUD

Utföranden	Hakband Huva
Ansikte	Öppen Stängd
Näsa	Öppen Stängd
Öron	Öppen Stängd
Övriga tillval	Kompressionspelott



Hood



Chin band

BEN

Utföranden	AD Knästrumpa AF Halvlårstrumpa AG Lårstrumpa AT Strumpbyxa Enbent strumpbyxa
Öppning mage	Dragkedja / kardborre <ul style="list-style-type: none"> • Framsida / baksida • insida / utsida
Gren	Öppen med eller utan stängning Sluten
Öppningar	Dragkedja / kardborre <ul style="list-style-type: none"> • Framsida / baksida • insida / utsida
Fastsättning	Bälte Utan häftband Triksåvslut 3 cm Häftband med noppor 3 cm Häftband Latex 3 cm Silikonhäftband för män 5 cm Silikonhäftband för kvinnor 5 cm Kardborre (väst ovan strumpbyxa) Kardborre (strumpbyxa ovan väst)
Fotdel	integrerad / separerad öppen / sluten tå
Övriga tillval	Kompressionspelott Komfortzon (knä / häll)



Strumpbyxa



Strumpbyxa med ett ben



Lårstrumpa



Knästrumpa

FOT

Utföranden	Tåkappa
Alternativ	Öppen tå Sluten tå
Övriga tillval	Kompressionspelott



Tåkappa

CICATREX® – EXEMPEL PÅ MÅTTILLVERKAT



Armstrumpa i valfri längd. Kan även kombineras med handske.
Välj om armstrumpan ska ha silikonhäftband, häftbandsbitar, skulderband eller BH-öglor.



Specialärm för behandling av arm och skuldra. Fästs med kardborreförslutning fram. Kan fås med axelkompression och integrerad komfortzon vid armbågen.



Väst med kompression under bysten samt med valfri förslutning på bröstet/ryggen. Bröstkupor går att få i Nature, vävt och Skin, med eller utan kompression. Vi kan även integrera en ficka för bröstprotes. Ett grenband som håller västen säkert på plats kan väljas till.



Thorax-väst med valfri armlängd. Välj mellan förslutning på bröstet eller ryggen. Kombinera gärna olika kvaliteter på olika delar av västen, exempelvis Cicatrex Skin i kuporna och Cicatrex Nature i resterande väst.

Bröstkupor går att få med eller utan kompression. Vi kan även integrera en ficka för bröstprotes.

Ett grenband som håller västen säkert på plats kan väljas till.



Maggördel i valfri längd. Välj även om du vill ha förstärkning i livdelen, häftband, häftbandsbitar, midjeband, kardborreband eller hängslen.



Byxa med öppen eller stängd gren samt valfria benlängd på båda benen. Kan även fås med fot med öppen eller slutet tådel. Längre livdel som tillval. Välj även häftband, häftbandsbitar, hängslen, kardborreband, kilar.



Strumpbyxa i olika utföranden med olika benlängd på båda benen. Välj mellan öppen eller slutet gren. Kan även fås med fot med öppen eller slutet tådel.

Längre livdel som tillval. Välj även häftband, häftbandsbitar, hängslen, kardborreband, kilar.

Längre livdel som tillval.

Diagonal livdel (bukvägg förstärkning) möjlig.



Tub för lår och/eller underben i valfri längd. Välj fastsättning med höftdel/midjeband, häftband eller häftbandsbitar.



Benstrumpa i valfri längd med öppen eller slutet fotdel. Kan även fås med integrerad tåkappa med tåseparatorer samt kompressionssömmar för ökat tryck mellan tårna.

Välj fastsättning med höftdel/midjeband, häftband eller häftbandsbitar.



Vi är experter på måttillverkade kompressionsprodukter för hela kroppen.

Vi har över 30 års erfarenhet av rund- och flatstickade samt vävda kompressionsmaterial. Allt tillverkas med millimeterprecision för perfekt individuell passform. Vi är särskilt skickliga på att tillverka komplexa produkter i små utföranden för barn.



Huvud- / halsband
Kompressionen kan varieras med kardborrebandet.



Hakbandage med snett huvudband.
Förslutning på huvudet med kardborreband samt fria eller täckta öron.



Helt huvudbandage med fria eller täckta ögon samt öron med/utan kompression.



Fingertuta
Med eller utan band samt med öppna eller slutna fingrar. Kan även fås med band för handleden.




Handske med valfri längd samt med öppna eller slutna fingrar. Handske kan även kombineras med armstrumpa.
Trycket kan ökas mellan fingrarna med kompressionssömmar.



Fingerseparator för ökat tryck mellan fingrarna. Placeras på handsken.

CICATREX® – EXEMPEL PÅ TILLVAL

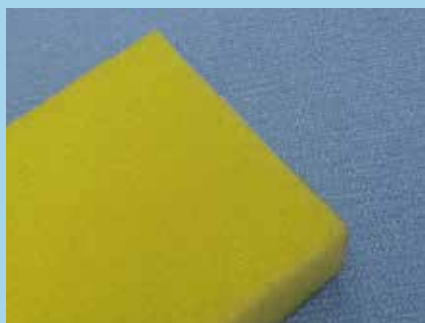

Minnesskum

Detta tillval kan användas för att minska ojämnheter och fördela trycket. Minnesskum sys in i plagget. Det kan kombineras med konstläder till ett stötskydd som sys fast på plaggets utsida.



Kompressionspelott

Kompressionspelott främjar tryckupbyggnaden och trycköverföringen. De sys in eller ligger lösa i fickor och kan kombineras med Silon-TEX®.



Silon-TEX®

Ett speciellt material baserat på silikon kan sys in i delar av plagget. Silon-TEX® främjar en fuktig hudmiljö och håller därigenom ärret smidigt och mjukt. Det kan sys in i upp till två tredjedelar av omkret-



Finger- och tåseparatorer

De ser till att öka trycket i utrymmena mellan fingrarna respektive tårna. Separatörerna placeras på handskar respektive tåkappor och kan bäras i kombination med alla kompressionsdelar.



konstläder

För att skapa bättre grepp kan man fästa konstläder på gripytorna. På utsatta ställen kan de dessutom skydda mot slitage.



Vinkel

I CICATREX® kompressionskläder kan man sy in en vinkel i arm- och knäveckan. Den gör att man undviker att det uppstår stora veck vid rörelsebegränsningar.



Öppningar

Förslutningar kan placeras efter patientens eget önskemål och där det är praktiskt att ha dem. Förslutningarna finns som dragkedjor (insydda eller utvändiga), kardborreband samt hakar och hyskor.



Kompressionsfria material

Det kompressionsfria materialet kan användas i axel- eller bröstområdet, men även mellan fingrar och tår, om ingen kompression behövs på dessa ställen.

CICATREX® – FÖR BARN

Färgglad behandling för barn: Våra högkvalitativa CICATREX® kompressionskläder blir ännu mer färgglada, och alla materialutföranden kan vid måttbeställning fås med påstrukna motiv (storlek ca 5 x 4 cm). Motiven föreställer de fyra små vännerna till Cica Trex – häxan från vår bilderbok med samma namn.



Sagobok för barn som på ett lekfullt och spännande sätt berättar varför det är viktigt att använda sina kompressionsmaterial.




Flera av **karaktärerna** i sagoboken kan tryckas på kompressionsplaggen.

Alla måttbeställda plagg kan vid önskemål tillverkas med färgglada sömmar!




Spuk

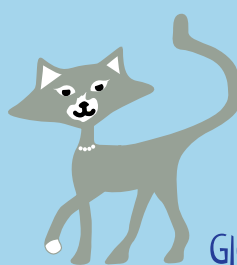

Gloria von Glanz



Elja Ehrenwert

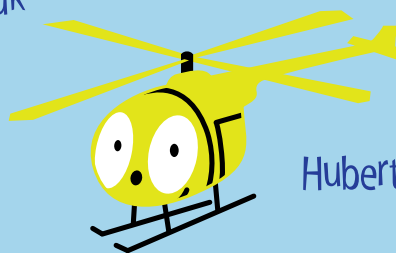

Hubertus Hui

Andra motiv att trycka?

Vi har fler motiv att välja bland. Dessa uppdateras ständigt så kontakta oss gärna inför beställning för en aktuell lista.

SILIMA® CARE CONCEPT

Vi tänker på dig
genom hela vård-
kedjan.

1

EFFEKTIV MINIMERING AV ÄRRVÄVNAD

CICATREX® är ett precisionstillverkat måttsytt kompressionsmaterial.

CICATREX® är en särskild typ av kompressionsmaterial för post-operativ användning i syfte att minimera ärrvävnad, exempelvis efter kirurgiskt ingrepp. Materialets egenskaper och kompression hämmar hudens naturliga mottryck vilket effektivt minimerar hypertrofisk ärrvävnad.

CICATREX® finns i flera kvaliteter, både i vävda och flatstickade varianter, och kan måttillverkas exakt efter dina önskemål och krav. Vi erbjuder även ett mindre sortiment av standardstorlekar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



2

ÅTERSKAPANDET AV EN NATURLIG KONTUR

SILIMA® är ett komplett sortiment av externa bröstproteser av mycket hög kvalitet

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning som både känns naturlig och ser naturlig ut.

SILIMA® tillverkas sedan 50 år vid vårt produktionscenter i Tyskland. Vi har full kontroll över hela produktionskedjan och kan säkerställa att enbart skonsamma material användas.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



3

HÅLLER EVENTUELLA ÖDEM UNDER KONTROLL

MOBIDERM® håller lymfödemet under kontroll och bidrar till en effektiv ödemreduktion.

Hemligheten bakom MOBIDERM® är den kubformade strukturen som masserar, stimulerar och aktiverar lymfsystemet från flera håll. Lymfvätska som ansamlats i vävnaden aktiveras och mobiliseras vilket leder till en snabbare reduktion av svullnaden.

MOBIDERM® har deltagit i flera studier och har bevisad effekt, dels i den initiala reduktionsfasen i kombination med bandagering och dels i underhållsfasen som komplement till flatstickade medicinska kompressionsstrumpor för användning på dagen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



Vill du veta mer?

Kontakta oss så skickar vi en katalog med mer information om Cicatrex och Silima. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

WINGS FOR YOUR HEALTH

THUASNE SCANDINAVIA AB

Box 95
131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
Email : info@thuasne.se
www.thuasne.se



THUASNE
120 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret Cedex - France



THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12
D-30938 Burgwedel, Germany

All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on medical devices, unless specifically identified as "NOT CE MARKED". Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne® should you need any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.

Last revision date: (2023-10). Photo credits: Thierry Maly, Studio Caterin, ©Studio Caterin, ©Shutterstock/Krakenimages/pixelheadphoto digitalskillet/m imagephotography/Roman Samborsyi/ Kate Kom

www.thuasne.se

